




POCKET GUIDE

ENDOLUMINALE VAKUUMTHERAPIE


Endo-SPONGE®

ZUR BEHANDLUNG VON ANASTOMOSENINSUFFIZIENZEN
AM UNTEREN GI-TRAKT

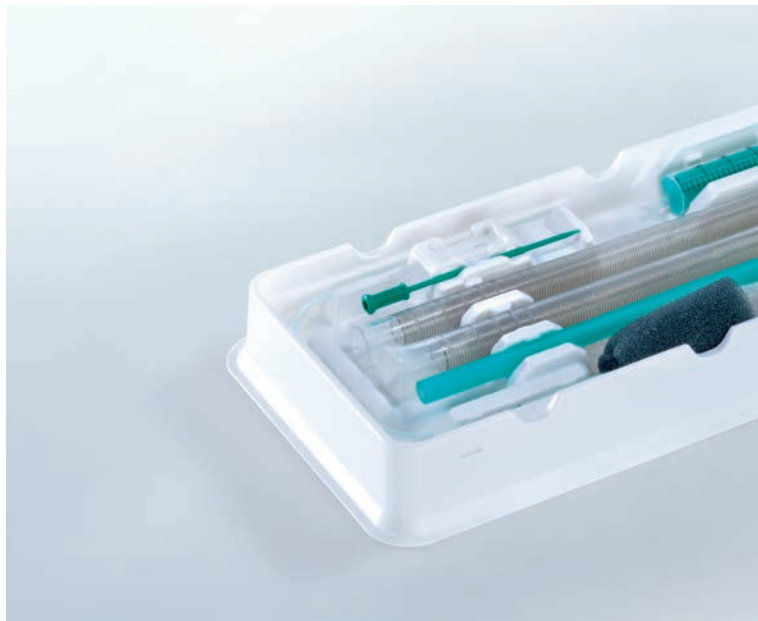

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VE	ART.-NR.
Endo-SPONGE®	10 Stück	5526510
Endo-SPONGE®	5 Stück	5526520
Endo-SPONGE®	1 Stück	5526530

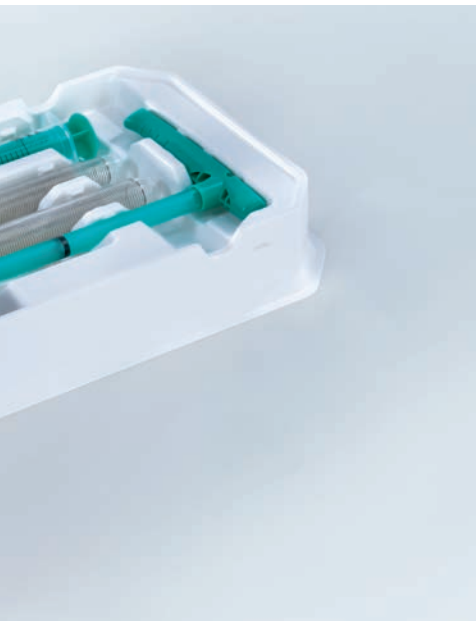

www.bbraun.de/endo-sponge

BEHANDLUNGSSET:

- Endo-SPONGE®
- Overtube in zwei versch. Größen
- Pusher
- Spülset
- Schiebeklemme
- Y-Verbindungsschlauch mit Luer-Lock-Ansatz zur REDYROB® Trans Plus Flasche

EXTRA ZU BESTELLEN

PRODUKT	VE	ART.-NR.
ASKINA® Gel Einzeltuben à 15 g	10 Stück	001419N
ASKINA® Gel Einzeltuben à 15 g	5 Stück	001419S
REDYROB® Trans Plus Regelbares Wunddrainage-System	10 Stück	5526604

Eso-SPONGE®

ZUR BEHANDLUNG VON ANASTOMOSENINSUFFIZIENZEN
AM OBEREN GI-TRAKT



BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	DURCHMESSER OVERTUBE	VE	ART.-NR.
Eso-SPONGE® Größe 1	Innen: 13 mm, Außen: 17 mm	1 Eingriffs-Set	5526550
Eso-SPONGE® Größe 1	Innen: 15 mm, Außen: 19 mm	1 Eingriffs-Set	5526540



www.bbraun.de/eso-sponge

BEHANDLUNGSSET:

- Eso-SPONGE®
- Overtube
(Zwei Größen
verfügbar)
- Pusher
- Spülset
- Schiebeklemme
- Y-Verbindungsstück
- Warnhinweis

Nicht im Set enthalten:

- Magensonde CH 16
- Regelbare, medizinische Pumpe
zur Vakuumbehandlung

EXTRA ZU BESTELLEN

PRODUKT	VE	ART.-NR.
ASKINA® Gel Einzeltuben à 15 g	10 Stück	001419N
ASKINA® Gel Einzeltuben à 15 g	5 Stück	001419S

OPS-KODIERUNG

DER ENDOLUMINALEN VAKUUMTHERAPIE

Nach OPS-Katalog Version 2018 des Deutschen Instituts für
Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)

5-916.a ANLAGE ODER WECHSEL EINES SYSTEMS ZUR VAKUUMTHERAPIE

Hinweis: Die Angabe dieses Kodes ist an die Durchführung
unter Operationsbedingungen mit Anästhesie gebunden.

(Ausnahmen: Es liegt eine neurologisch bedingte Analgesie vor oder
es erfolgt eine endoösophageale oder endorektale Anwendung
einer Vakuumtherapie).

Bei einer Entfernung mit Debridement ist ein Kode aus den Bereichen
5-850 ff., 5-869.1 oder 5-896 ff. zu verwenden. Die Dauer der Anwendung
der Vakuumtherapie ist gesondert zu kodieren (8-190.2 ff., 8-190.3 ff.) (1).

(1) Quelle: DIMDI / OPS Version 2018

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2018/block-5-89...5-92.htm#code5-916>

5-916.a4

ENDOREKTAL Endo-SPONGE® KIT



Inkl. endorektale Vakuumtherapie zur Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen nach tiefer anteriorer Rektumresektion bei lokaler Peritonitis mit einspiegelbarer Wundhöhle

5-916.a6

ENDOÖSOPHAGEAL Eso-SPONGE® KIT



Ihr Ansprechpartner bei B. Braun

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 48479 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | www.bbraun.ch

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de

Hersteller nach MDD 93/42/EWG

Endo-SPONGE, Eso-SPONGE:

B. Braun Surgical, S.A. | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spanien

REDYROB, ASKINA:

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „ASKINA“, „Endo-SPONGE“, „Eso-SPONGE“ und „REDYROB“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG und ihrer Tochtergesellschaften.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.